



TONELINK™ APP
QUICK GUIDE

WIDEX®

HIGH DEFINITION HEARING



KOM GODT I GANG

TONELINK™ appen er beregnet til at arbejde sammen med alle nyere Widex-høreapparater og kan tilsluttes Apple- og Android-telefoner.

Download TONELINK™ appen fra App Store eller Google Play.

SÅDAN FUNKERER DEN

TONELINK™ appen bruger telefonens højttalere til at sende instruktioner til dine høreapparater ved hjælp af højfrekvente lyde.

Første gang du bruger appen, skal du parre høreapparaterne med telefonen. Følg disse trin, og bemærk, at du muligvis skal justere telefonens lydstyrke i processen.

PARRING AF **TONELINK™** MED DIN TELEFON

1. Åbn TONELINK™ appen, og følg instruktionerne på skærmen
2. Find og scan QR-koden i brugsanvisningen til høreapparatet, hvis du har fået udleveret en af hørespecialisten. Hvis ikke, så tryk på **Spring over**
3. Genstart høreapparaterne ved at slukke og tænde dem igen. Tag dem derefter på
4. Par høreapparaterne med din telefon ved at trykke på **Dan par**
5. Hvis du hører en lyd i høreapparaterne, så tryk på **Ja**
6. Hvis du ikke hører en lyd i høreapparaterne, så tryk på **Nej**. Juster derefter lydstyrken på telefonen, og tryk på **Dan par** igen

TONELINK™ appen hjælper dig med at skifte mellem programmer. Ved at scanne QR-koden fra brugsanvisningen til høreapparatet kan appen vise de programmer, der er valgt specielt til dig.

TONELINK™

APPENS START- SKÆRM

Menu


Nulstil lyd

Telefonens lydstyrke

Hjælp i appen

Skift eller
vælg program

Slå lyd fra/til og
justering af lydstyrke

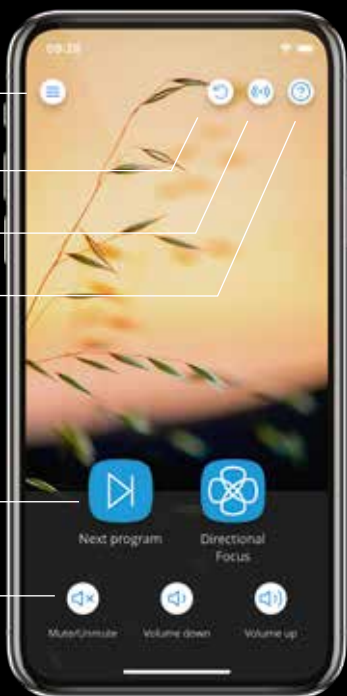



NEM BETJENING AF NØGLE- FUNKTIONER

Med TONELINK™ kan du nemt:

- Skifte program
- Justere lydstyrken
- Slå lyden fra
- Ændre retningelt fokus

FÅ FLERE OPLYSNINGER PÅ

www.widex.dk/tonelink

ER DIN TELEFON KOMPATIBEL?

www.widex.dk/apps

ØNSKER DU TIPS, ELLER VIL DU VIDE MERE OM HØRELSE OG HØRETAB?

www.widex.dk/nyhedsbrev

FÅ OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE:

www.widex.dk/vedligeholdelse



Trykt 2020-01. 9 502 5402 010 #01
Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology,
TruAcoustics™, WIDEX REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ og DEX
er varemærker registreret af Widex A/S.



WIDEX A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lyngø

Apple og Apple-logoet er varemærker registreret af Apple Inc. i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke registreret af Apple Inc.
Android er et varemærke registreret af Google Inc. Google Play
og Google Play-logoet er varemærker registreret af Google Inc.